



AMORELIE  
*Joy*

***Wiegt nix, aber  
macht stark.***

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
**Glow**  
*Liebeskugeln*

## ***Was ich bin & was ich mache***

Liebeskugeln zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur – kann für intensivere Orgasmen sorgen.

### ***Lass es uns tun!***

Reibe die Liebeskugeln mit etwas wasserbasiertem Gleitgel ein und führe sie bis zum Rückholbändchen ein – ähnlich wie bei einem Tampon. Spanne die Beckenbodenmuskulatur bewusst an, um die Kugeln im Inneren zu halten, und bleibe in Bewegung. Wie wäre es mit leichtem Yoga? Trage sie ein- bis zweimal täglich für etwa 15 Minuten, aber maximal 4 Stunden am Tag. Mache einen Tag Pause, wenn Du Muskelkater bekommst und trainiere erst wieder, wenn Du ihn nicht mehr spürst.



## **... und zwar richtig!**

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
- ♥ Verwende nur wasserbasierte Gleitgele
- ♥ Massageöle sind leider tabu – sorry!
- ♥ Reinige das Toy vor und nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser
- ♥ Tipp für Hygiene-Nerds: Toycleaner benutzen!
- ♥ Bewahre das Toy sicher und trocken auf
- ♥ Direkte Sonneneinstrahlung oder extreme Temperaturen sind ein großes No-No



# ***Du willst es genau wissen, oder?!***

## ***Technische Daten***

- ♥ Gemacht aus zertifiziertem Silikon
- ♥ Ist wasserdicht und liebt Tauchgänge
- ♥ Länge: 17,1 cm
- ♥ Breite 2,9 cm
- ♥ Höhe: 2,9 cm
- ♥ Durchmesser: 2,9 cm
- ♥ Gesamtgewicht: 75 g
- ♥ Einführbare Länge: 9 cm



## **Der Gesundheit zuliebe**

- Befrage in folgenden Situationen vor dem Tragen des Toys unbedingt Deine\*n Ärzt\*in:
  - Krankheiten und Verwachsungen,
  - Inkontinenz oder Senkbeschwerden,
  - Schwangerschaft und/oder
  - Verhütung mit einer Spirale.
- Trage das Toy in folgenden Situationen nicht:
  - bei geschwollener, gereizter oder entzündeter Haut,
  - bei vaginalen Infekten,
  - während des Geschlechtsverkehrs,
  - während der Menstruation,
  - in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt,
  - nach Operationen im Beckenbereich,
  - wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder
  - wenn Du allergisch auf das Material reagierst bzw. wenn Dir eine Allergie auf das Material bekannt ist.
- Falls während der Anwendung Schmerzen und/oder Unwohlsein auftreten, sollte die Anwendung sofort abgebrochen und von einer weiteren Verwendung abgesehen werden.
- Gib das Toy nicht an Dritte weiter, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
- Nicht mit Produkten reinigen, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere ätzende Substanzen enthalten. Nicht für die Waschmaschine oder den Geschirrspüler geeignet.

- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys, Kindern, Haustieren und Tieren auf.
- Nur zur vaginalen Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.
- Zur vaginalen Anwendung geeignet. Das Toy ist nur für den sachgemäßen Gebrauch geeignet und entsprechend des Verwendungszweckes im Rahmen seiner Funktionsbeschreibung zu verwenden.

## ***Der Umwelt zuliebe***

Dieses Produkt kannst Du umweltgerecht im Hausmüll entsorgen.

## ***Garantiedingsbums***

Wir gewährleisten, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktschäden oder Defekte, die auf einen Unfall, Missbrauch, Schmutz, Wasser, Temperierung, unangemessenen Gebrauch, normalen Verschleiß oder eine Reparatur durch ein nicht autorisiertes Servicebüro zurückzuführen sind. Im Falle eines Garantieanspruchs, werden wir das Produkt für Dich kostenlos ersetzen. Deine gesetzlichen Rechte – Mängelrechte nach den §§ 437 ff. BGB – werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.